

vitaran
polynucleotides

THE POWER OF
POLYNUCLEOTIDES



MIKÄ VITARAN ON?

VITARAN on CE-merkitty injektoitava polynukleotidivalmiste, joka hyödyntää lohikalojen DNA:sta saatavia polynukleotideja ihon uudistamiseen.

Biostimuloiva hoito tukee ihon uusiutumista, korjaavia eprosesseja ja tasapainoa solutasolla. Valmisteella on myös tulehdusreaktiota rauhoittavia ominaisuuksia.

Koostumus: 20mg/ml polynukleotidia (PN 2%)

Hoitoalueet

Silmänympärys, koko kasvot, kaula, rintakehä ja dekoltee, kädet sekä vartalon alueet, kuten vatsa ja käsivarret.

Koulutusvaatimus

Tuotteen ammattikäyttö edellyttää soveltuvaa koulutusta ihon biostimulaatiohoidoista ja/tai polynukleotidihoidoista.

AKTIVOI FIBROBLASTEJA JA
KASVUTEKIJÖITÄ

TUKEE KOLLAGEENIN JA ELASTIININ
TUOTANTOA

HÄIVYTTÄÄ PIENIÄ JUONTEITA JA
PINTARYPPYJÄ

PARANTAA IHON KOSTEUSTASAPAINOA JA
SUOJAMUURIA

LISÄÄ KIINTEYTTÄ, JOUSTAVUUTTA JA
TASOITTA IHON RAKENNETTA

ANTIOKSIDANTTINEN SUOJA VAPAITA
RADIKAALEJA VASTAAN





VITARAN I

2 x 1ml ruiskua
(20 mg/ml) 

Hoitoalueet

Silmänympärys sekä pienet kasvojen ja vartalon alueet

Hyödyt

- Täyttää lieviä ja kohtalaisia kuoppia
- Häivyttää pieniä juonteita ja ohutta, rypistynyttä ihoa
- Stimuloi kollageenin tuotantoa

VITARAN II

2 x 2ml ruiskua
(20 mg/ml) 

Hoitoalueet

Koko kasvot, kaula, kädet, rintakehä, vatsa, käsivarret ja hiuspohja

Hyödyt

- Tukee ihon luonnollista suojamuuria
- Lisää ihon kimmoisuutta ja joustavuutta
- Rauhoittavia ominaisuuksia

VITARAN EYES

1 x 1ml ruisku
(20 mg/ml) 

Täsmällinen määrä kohdennettuun silmänympäryshoitoon

Hyödyt


- Kehitetty silmänympärysihon uudistamiseen
- Häivyttää tummuutta ja pieniä juonteita
- Kosteuttaa syvästi ja silottaa

KÄYTTÖAIHEET JA HOITOALUEET

Ammattikäyttö edellyttää soveltuvaa koulutusta ihon biostimulaatio- ja/tai polynukleotidihoidoista.



Kuiva tai samea iho

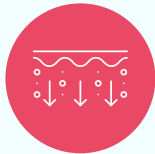

Kimmoisuuden tai kiinteyden menetys



Pienet juonteet ja rypyt



Epätasainen pigmentti



Väsynyt iho



Hehkun puute



SILMÄNYMPÄRYS



KOKO KASVOT



KÄDET



KAULA



RINTAKEHÄ



VARTALON ALUEET, KUTEN KÄSIVARRET JA VATSA

VASTA-AIHEET

Tutustu täydelliseen vasta-aiheluetteloon tuotteen pakkausselosteessa..

Pysyvä täyteaine tai äskettäin tehty täyteainehoito.

Tulehduskipulääkkeet, verihiutaleiden toimintaa estävät lääkkeet, antikoagulantit tai immunosuppressiivinen lääkitys.

Allergiset sairaudet tai kala-allergia, autoimmuunisairaus, sarkoidoosi, granulomatoottinen sairaus, Oslerin endokardiitti tai keloiditaipumus.

Yliherkkyys natriumpolynukleotidille tai muille aineosille. (Sodium Polynucleotide).

Raskaus tai imetys.

Alle 18-vuotiaat.

JÄLKIHOITO



Vältä raskasta liikuntaa vähintään 24 tuntia



Vältä meikkiä vähintään 12 tuntia



Vältä alkoholia vähintään 24 tuntia



Älä kosketele hoidettua aluetta



Vältä voimakasta kuumuutta



Vältä muita kasvohoitoja 2 viikon ajan



Arnika-voidetta tarvittaessa



Antihistamiini vain ammattilaisen ohjeella lievään reaktioon



Kylmäpakkaus turvotukseen

Mustelmia ja turvotusta voi esiintyä jopa viikon ajan. Paras tulos kehittyy yleensä 2-4 viikossa.

vitaran
polynucleotides

INJEKTIOPROTOKOLLAT

VITARAN voidaan annostella kanyylilla tai pinnallisesti neulalla. mikrodepot- eli nappage-tekniikalla.

Neula: 33G **Kanyyli:** 25G




SILMÄNYMPÄRYS

0.5ml / puoli kanyyllilla tai mesoterapiatekniikalla

2-3 hoitokertaa noin kuukauden välein



HOITOTEKNIikka
Kanyyli

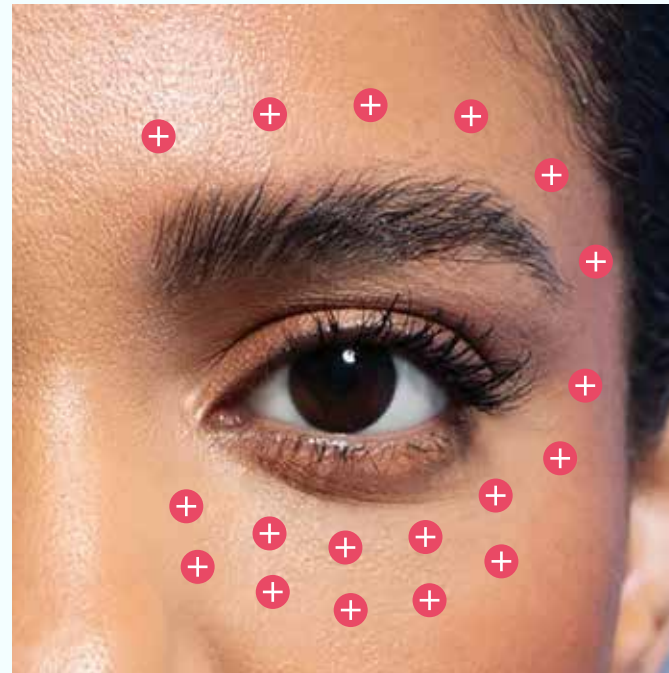


HOITOTEKNIikka
Nappage


KAULA JA

2-4 ml / hoitokerta

3 hoitokertaa noin kuukauden välein

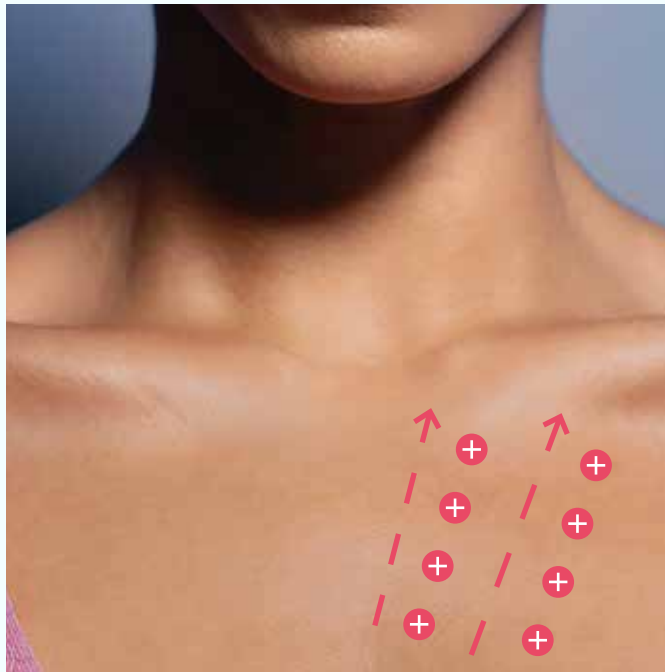

HOITOTEKNIikka
Mikrobolus / lineaarinen
tekniikka

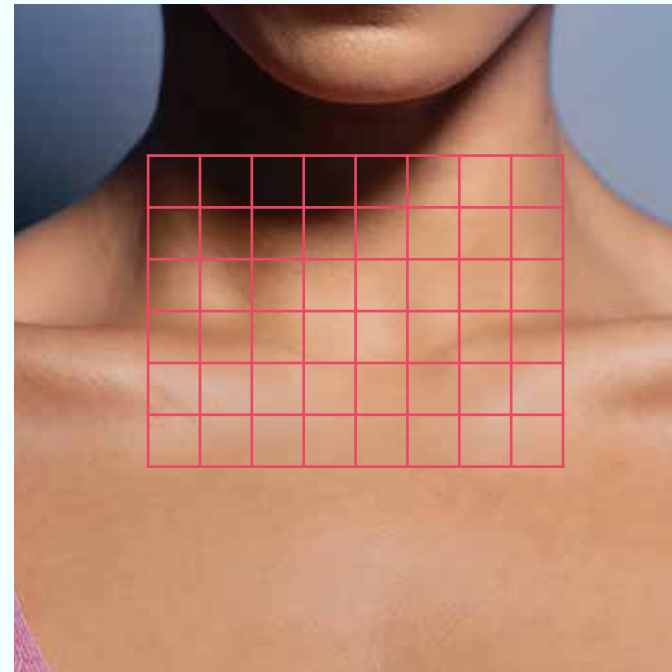


HOITOTEKNIikka
Ruudukko

KOKO KASVOT

2-4 ml / hoito

3 hoitokertaa noin kuukauden välein

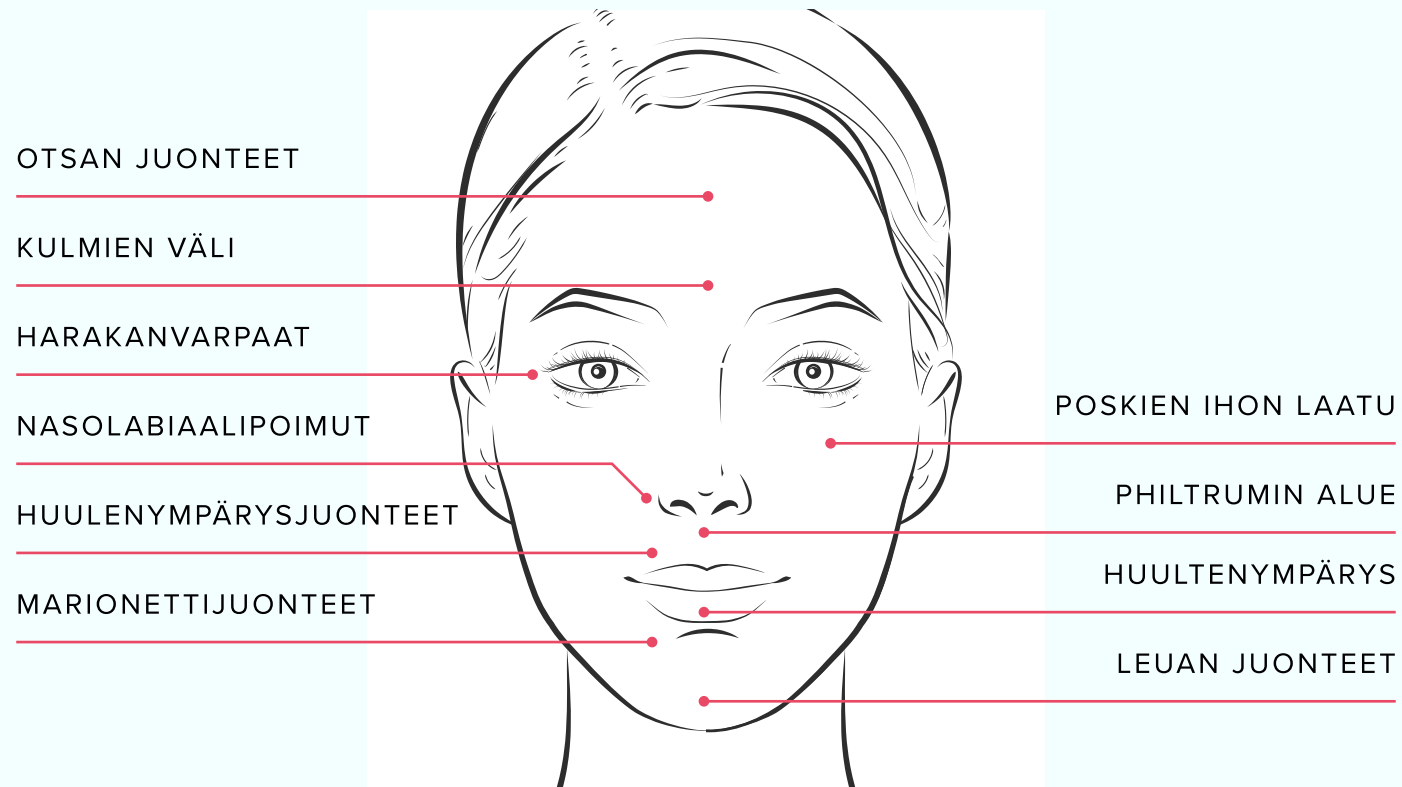

HOITOTEKNIikka
Neula tai kanyyli

KÄSIEN UUDISTAMINEN

1-2 ml / käsi

3 hoitokertaa noin kuukauden välein



HOITOTEKNIikka
Kanyyli




HOITOTEKNIikka
Mesoterapia

HIUSRAJA

1-2 ml mesoterapiana

3-4 hoitokertaa noin kuukauden välein

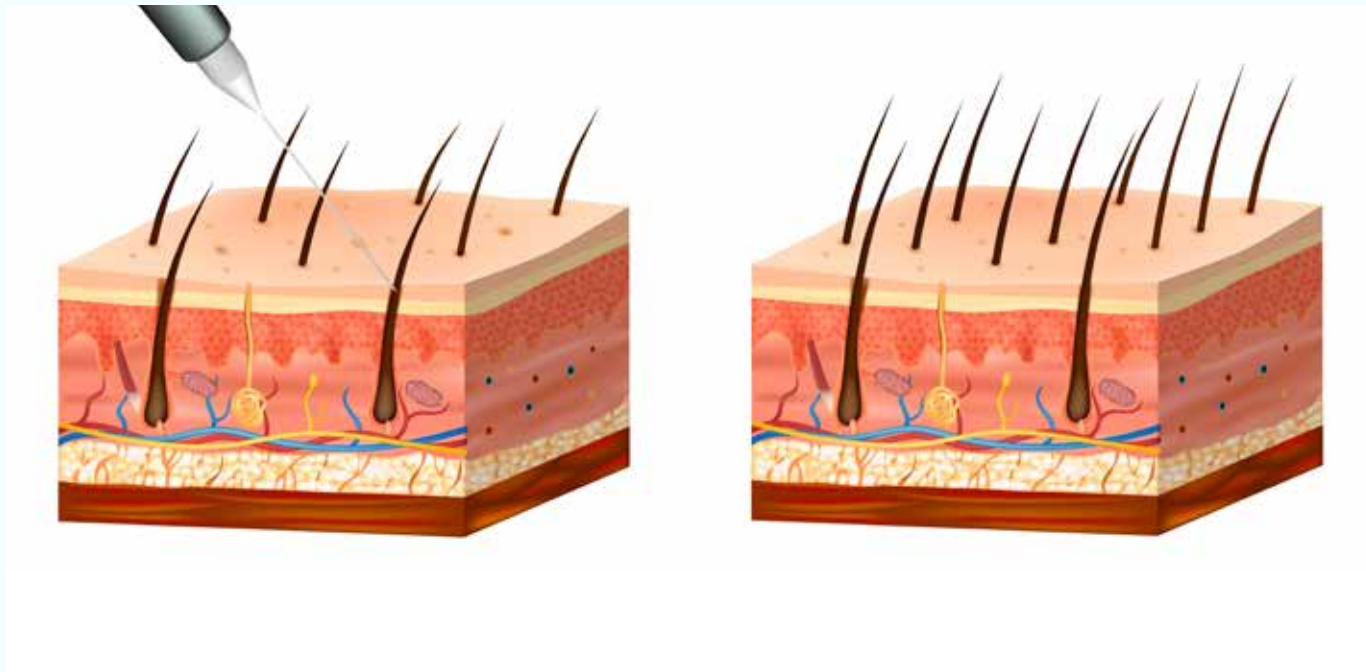

HOITOTEKNIikka
Mesoterapia

vitaran
polynucleotides

TUTKIMUKSEEN PERUSTUVAT TULOKSET

VITARAN-polynukleotidit edustavat esteettisen
ihonhoidon uusimpia innovaatioita, ja niiden
vaikutuksia on tutkittu kliinisissä tutkimuksissa.



KLIININEN TUTKIMUS

Polynukleotidin vaikutukset silmänympärysryppyjen korjaamiseen Antera- kolmiulotteisen kameran avulla

Tutkimukseen osallistui 30 tervettä 19-60-vuotiasta vapaaehtoista, joiden silmän ulkonurkan juonteiden luokitus oli 2-4. Hoito tehtiin neljä kertaa kahden viikon välein.


Tutkimuksessa juonteet lievittyivät ilman merkittäviä haittavaikutuksia. Osallistujat olivat tyytyväisiä tuloksiin ja halukkaita uusimaan hoidon.

Jeong Ho Kim • Eon Su Kim • Sug Won Kim • Seung Phil Hong • Jiye Kim

Vastaanotettu 26.10.2021 / hyväksytty 24.2.2022

VIKKO 0


VIKKO 18

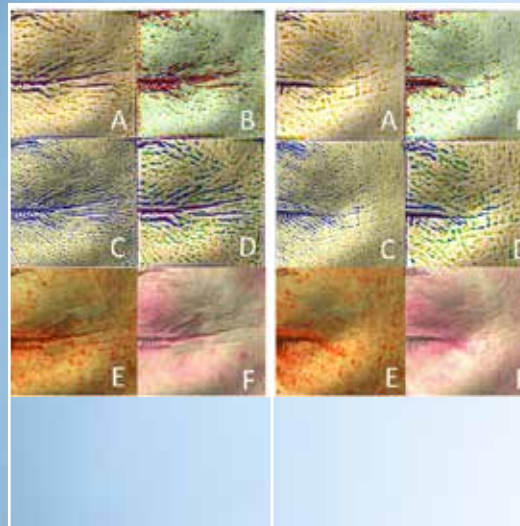

Photograph of crow's feet at baseline (V2, left) and 18 weeks after first treatment of polynucleotide filler (right)

VIKKO 0

VIKKO 18

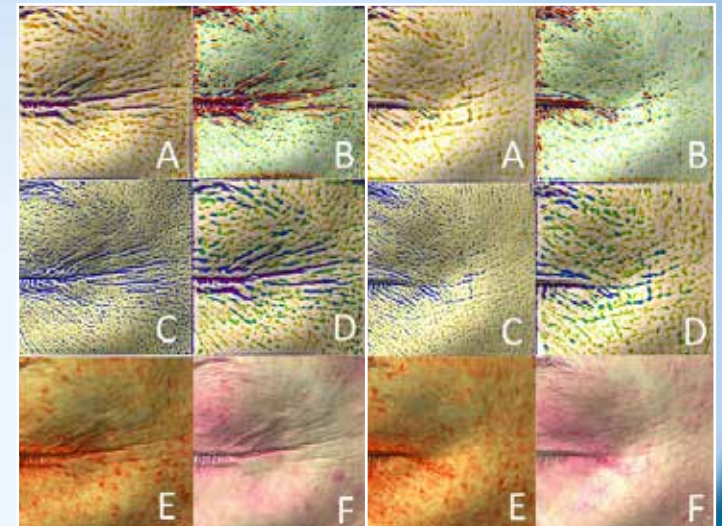

Antera 3D image of crow's feet at baseline (left) and 18 weeks after first treatment of polynucleotide filler (right).
a. wrinkle, b. texture, c. pore, d. depression, e. melanin level, f. hemoglobin level

TODELLISIA TULOKSIA



ENNEN

JÄLKEEN



ENNEN

JÄLKEEN



ENNEN

JÄLKEEN



ENNEN

JÄLKEEN



ENNEN

JÄLKEEN

KOKEMUKSIA



“VITARAN on erinomainen vaihtoehto asiakkaille, jotka haluavat häivyttää tummia silmäanalusia ja uudistaa silmänympärysihoa. Valmisteen korkea polynukleotidipitoisuus tukee ihon kirkastumista ja biorevitalisaatiota.”

Dr Zoya Awan, Medical Director of Secret Aesthetics,
Harvey Nichols Birmingham



“Läpimurto esteettisissä hoidoissa - tuote, joka kuuluu jokaisen klinikan valikoimaan.”

Dr Apostolos Vlachogiorgos,
Plastic Surgeon



“Kahden VITARAN-hoidon jälkeen silmänympärysalueeni näyttää selvästi paremmalta. Aion ottaa hoidon säännölliseksi osaksi ihonhoitorutiiniani.”

Evie Samuel, Skincare Expert



vitaran

polynucleotides

LISÄTIETOJA TUOTTEESTA

www.astomed.fi

KOULUTUSTIEDUSTELUT

info@astomed.fi



@astomed.finland



SHOP NOW

Forbes ELLE HELLO!